

# 室内犬のための 機能性ボディサポーター **FIX-1**

## 取扱説明書

この度は製品をご購入頂き誠に有難うございます。

正しい使用方法をご理解頂くために記載内容をお読みください。

## サポーターの着用方法

関節に無理がないようにゆっくりと、丁寧に。

膝を正しいポジションに合わせてサポーターを着せましょう。



# 1

サポーターの首周りを広げて、頭から着用します。



# 2

次に、前足を順番に通します。



# 3

後ろ足の足首のホールを外側から指で上げ、爪が引っかからないように後ろ足を通します。



# 4

足を通す際は、愛犬の関節に負担がないように関節方向に足を曲げることがポイントです。



# 5

太もも内側のラインを上引っ張り、サポーターの模様を確認しながら膝の位置を収めます。膝下を整えて、全体的にサポーターを適正に着用できているかを確認しましょう。

\* 動き始めると服がずり落ちる場合があります。

その際は全体的にサポーターを頭の方に引っ張り、タイトな着用状態を維持してください。

\* ベットが噛んだり、爪が引っかかると製品が破損する恐れがありますのでご注意ください。

\* 脱がせる時は着用時とは逆の順番で、後ろ足から脱がせてください。

## 洗濯について

サポーターを洗濯する際は下記に注意してください。

- ・洗濯の前にサポーターに付着している毛を除去してください。
- ・ぬるま湯（30℃）での洗濯を推奨しています。熱いお湯は避けましょう。
- ・漂白成分のある洗剤や漂白剤は使用しないようにお願いします。
- ・洗濯後は軽く水を切り、陰干ししてください。

## サイズの確認

サポーターの首部分の裏側に、下記のようなラインの模様があります。  
これはサイズを表しており、本数が少ない順にXS・S・M・Lです。



## 素材について

いつも衛生的で心地よく、爽やかに。

抗菌・防臭・吸湿・速乾を兼ね備えたSEK認証の高機能素材。

- ・素材に含まれた銀の成分で、優れた抗菌 / 防臭効果。
- ・特殊な繊維構造で高い吸湿 / 速乾性能を発揮。
- ・有害な紫外線 UV-AとUV-Bをカット。

カラー：レッド&ブルー  
          オレンジ&ブルー

カラー：ホワイトストライプ  
          イエローストライプ

繊維：ポリエステル / 70.5%  
      ポリアミド / 20.5%  
      ポリウレタン / 9%

繊維：ポリエステル / 72.9%  
      ポリアミド / 19.3%  
      ポリウレタン / 7.8%



SEK は一般社団法人  
繊維評価技術協議会  
(織技協) が認証した  
機能加工繊維製品の  
認証マークです。

## ご使用上の注意

適正サイズを着用することが大切です。

サイズが合っていないと、本来の効果が期待できません。

製品の特性上、適正サイズでの着用や膝位置の調整がとても重要になります。  
パッケージ裏面のサイズ表を参考に、犬のサイズや体重を正確に測定してください。  
着用時にタイトで歩きづらい、または動きにくかったり座り込んでしまう場合は、  
ワンサイズ大きめのサポーターでフィッティングし直してみてください。  
毛量やカットによってはサイズが変わる場合がありますのでご注意ください。

初回着用時は、まだ犬も慣れていません。

最初は短い運動から始めて、少しずつ着用時間を伸ばしましょう。

体にフィットする補正サポーターは、犬にとっても最初は違和感があるものです。  
特に着用直後は、じっと動かなくなったり嫌がる場合があります。  
補正サポーターには適応期間が必要ですので、最初は短い時間から始めてください。  
また、高齢犬や重度の関節疾患を患っている犬は足の筋肉が衰弱しています。  
長時間の活動は控え、少しずつ運動を繰り返して徐々に慣れていくようにしましょう。  
室内だけではなく野外に散歩に行く時など、活発に動く時に着用すると効果的です。  
個体差はありますが、継続使用することで筋力の回復や歩行姿勢の変化が見られます。

滑りやすい床・ベッドやソファなど高所への昇り降り・  
激しいジャンプ・後ろ足だけで立ち上がるような動作は  
関節に負担が大きいためご注意ください。

ペットが寝る時や活動が少ない休息時には、  
サポーターを脱がせるようにしてください。